


H E M O D I A L Y S I S T R E A T M E N T

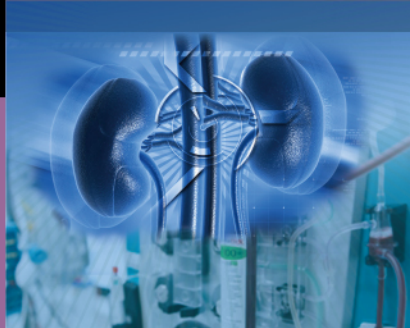

BIOTEQ[®]
Improving lives

台湾第一品牌
THE BEST FROM TAIWAN

“邦特”血液回路管
“标准型”内瘘管翼状针
“安全型”内瘘管翼状针

ISO 13485 FDA 510(K)

CE GMP CFDA

医疗器械注册证编号：



国食药监械(许)字2010第3450078号

国食药监械(许)字2011第3450006号



“邦特”血液回路管

● 通用型适用：费森尤斯、金宝、百特、贝朗、东丽、日机装、尼普洛、贝尔克等机型

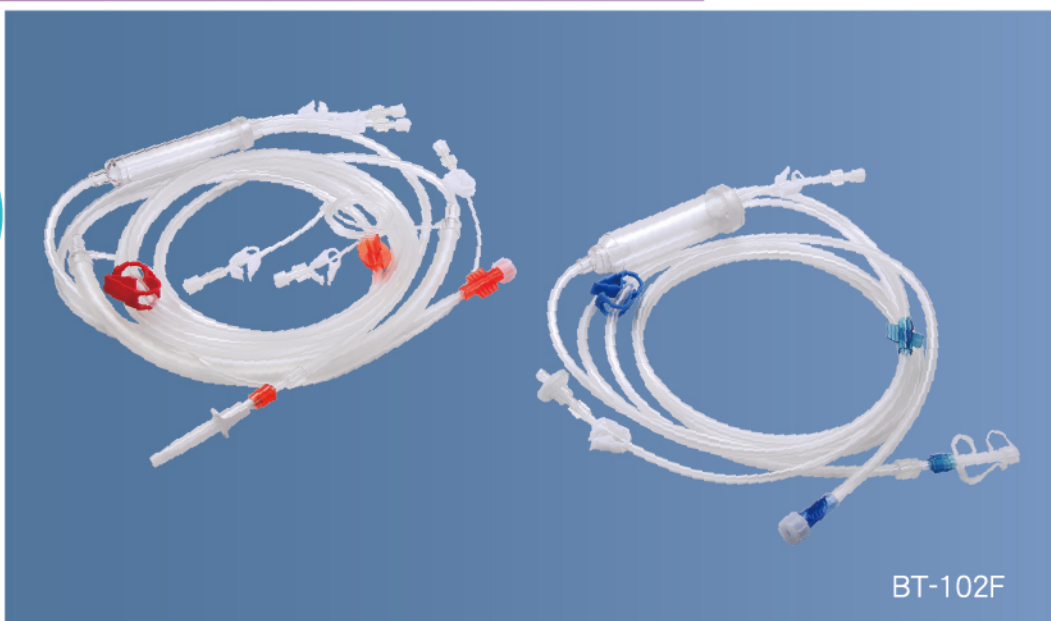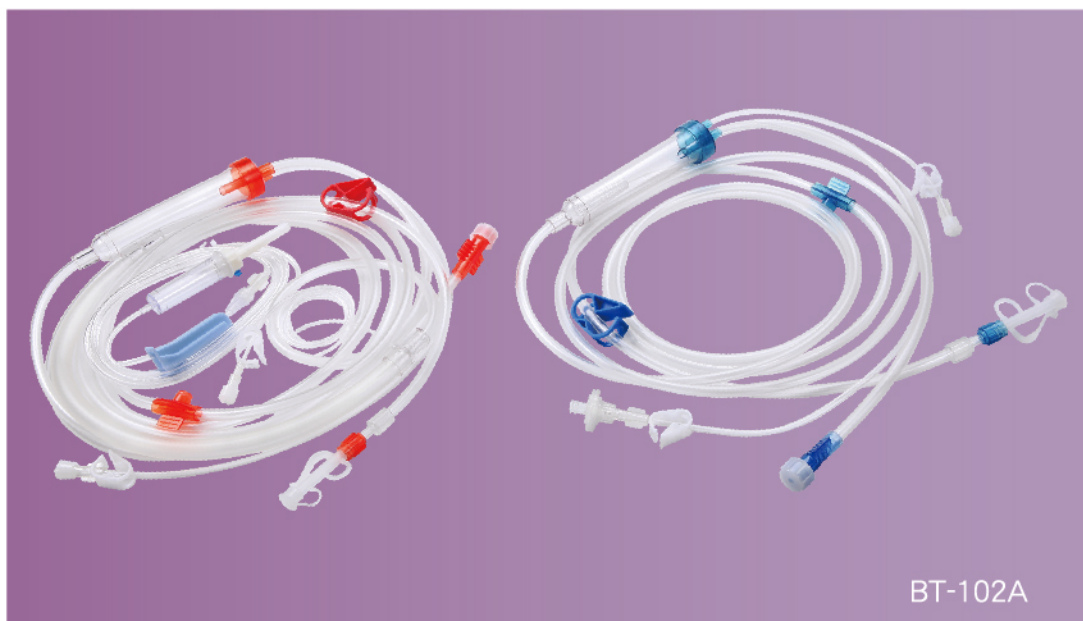

血液回路管组 Blood Line:

102 系列型号: BT-102A BT-102B
BT-102F BT-102HA
BT-102HB BT-102PB

泵 管: $\Phi 12\text{mm} \times \Phi 8\text{mm}$

静脉壶: $\Phi 22\text{mm}$ 、 $\Phi 30\text{mm}$



“邦特”内瘘管翼状针



品質比較：

邦特公司内瘘管翼状针，在与市售竞品比较F0、F1、F2、F3之检验时，其数值皆优于它牌。

品牌	参数	F0	F1	F2	F3	总压力(g)
BIOTEQ®		44.5	61.5	86.8	9.8	202.7
N 牌		59.5	63.0	85.1	6.6	214.2
K 牌		55.7	66.0	89.4	12.8	224.0
J 牌		61.1	72.7	85.0	5.6	224.5

总压力数值越小表示针越锐利

穿刺力解析图

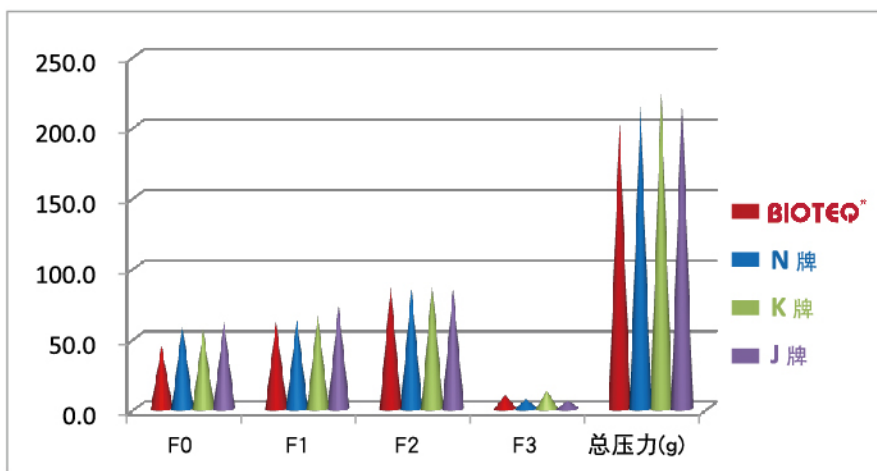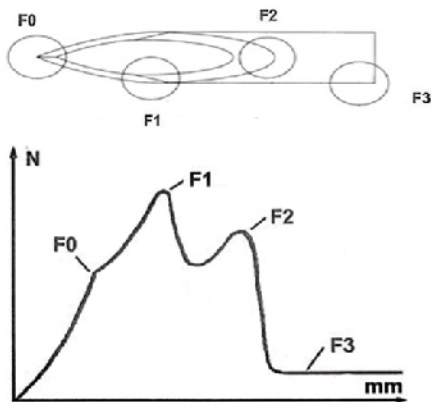


F0：穿刺力 F1：切削力 F2：扩张力 F3：滑动力 总压力：F0+F1+F2+F3


“安全型”内瘘管翼状针操作步骤：




将固定用纸胶撕去

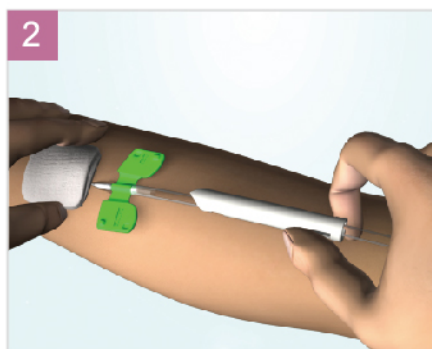


将安全针套长端朝上，顺前滑推至蝴蝶翼处，以纱布按压伤口处

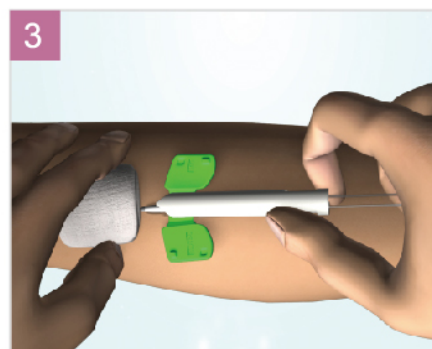


以纱布按压伤口处，将安全针套长端朝上，顺前滑推至蝴蝶翼处

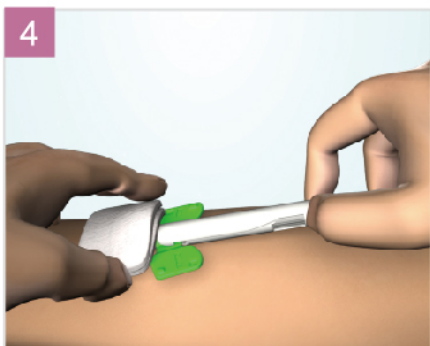

以拇指及食指扣住安全针套尾端

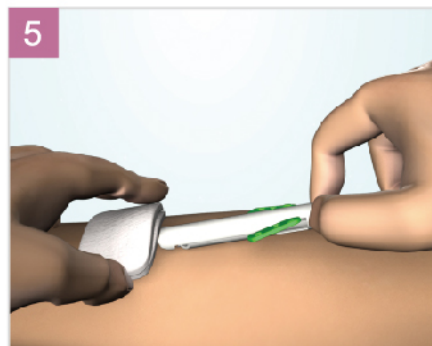


将PVC管往后拉出，针头往后退入安全针套

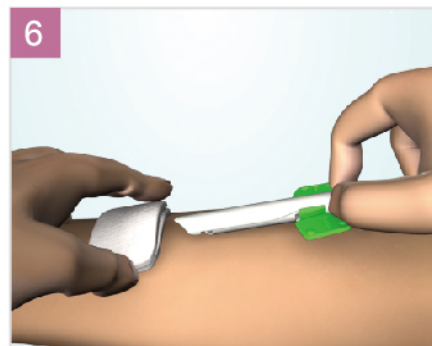


将穿刺针抽离肾友廬管，确认穿刺针完全抽离肾友廬管，以纱布按压伤口止血

产品特点:

○ 针头使用日系原装进口，超薄设计

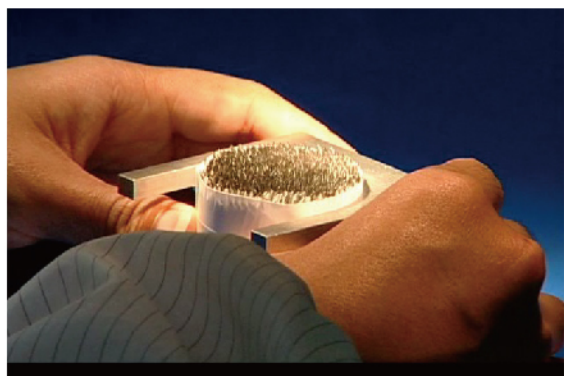

○ 蝴蝶翼防滑及凹 - 凸扣设计，易于掌控上针力道及角度

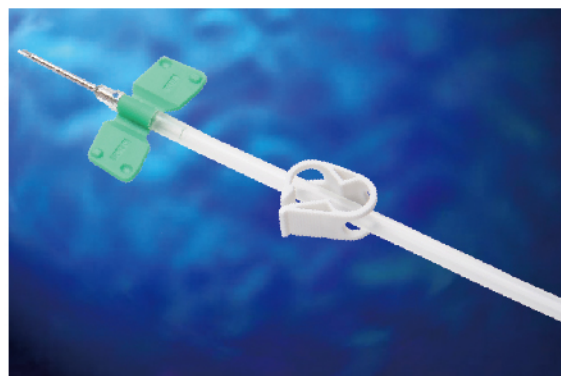

○ 针头特殊披膜液，有效降低疼痛感



○ 专利安全装置设计，避免扎针意外



内瘘管翼状针产品规格型号

规格型号	针体规格	型式	针体长度		包装
			1"	1 1/4"	
固定翼型	15G	安全型	BT-110B	BT-110	1支/包装；2支/包装
			BT-110BF	BT-110F	
	16G	安全型	BT-111B	BT-111	1支/包装；2支/包装
			BT-111BF	BT-111F	
	17G	安全型	BT-112B	BT-112	1支/包装；2支/包装
			BT-112BF	BT-112F	
旋转翼型	15G	安全型	BT-110R	BT-110A	1支/包装；2支/包装
			BT-110RF	BT-110AF	
	16G	安全型	BT-111R	BT-111A	1支/包装；2支/包装
			BT-111RF	BT-111AF	
	17G	安全型	BT-112R	BT-112A	1支/包装；2支/包装
			BT-112RF	BT-112AF	

制造:

台湾邦特生物科技股份有限公司
BIOTEQUE CORPORATION

地址: 104 台北市长安东路一段 23 号 5 楼之 6
Tel: +886-2-25710269 Fax: +886-2-25361967
Email: sales@bioteq.com.tw
Website: www.bioteq.com.tw

中国总代理:

常熟市如保医疗器械销售有限公司

地址: 江苏省常熟市高新技术产业园联丰路25号
邮编: 215500
Tel: 0512-51538692 81588692
Fax: 0512-51538697